歯周ポケット測定器 ペリオパム



Perio Pam

ひとりで正確な歯周検査が可能に

リニューアル

使いやすさを追求し 素材から 一新しました

- 検査圧の異なる2つのラインナップ
- ■ワイヤレス対応
- 衛生的なディスポーザブル



PerioPam製品ページ



歯 周 ポケット 測 定 器 ペリオパム

Perio Pam

プローブ

Perio Pam

FAST

10 min

__

4.5 min

対象歯 28 本の方を6点法で測定



ポケット検査の時間を短縮


PerioPamの検査はフットスイッチ入力のため、記入の手間がありません。プローブからペンへ持ち替える必要がなく、口腔内から目を離さずに検査ができるため、検査時間を削減できます。

検査結果を簡単にプリント

PerioPamで検査をしたデータは印刷をすることで、患者さんに説明する資料になります。ポケットチャートを印刷するだけではなく、歯周ポケットの深さや出血、排膿などをイラストにしてお伝えするレイアウト、検査データを比較するレイアウトをご用意しております。



カルテ用レイアウト

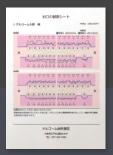

比較用レイアウト



歯肉退縮レイアウト

●ユーザーボイス

測定者による数値の バラツキがなくなるので 全員で使用しています。

手書きよりもスピードが 早いことと、 ビジュアル的な印刷物が すぐに作成できるので 気に入っています。 手用プローブによる測定・ 記録の弱点が改善できると 思いました。

> ポケット測定を1人で 行える事で時間がかからず、 診療の効率が 上がっているように 思います。

測定時の検査圧が
一定なので、
正確な検査結果が得られる
ようになりました。

PerioPamで変わる 歯周病検査のカタチ

POINT 1

正確な歯周検査が可能に

これまで、正確な歯周ポケット数値の計測は個人の習熟度に頼るところ が大きく、検査者によって数値にバラつきがみられました。

PerioPamを歯周ポケットに挿入すると、一定の圧力で計測できるので、 正確な検査を行うことができます。

POINT 2

補助なし・一人で歯周検査入力

PerioPamで計測した数値を足元のフットスイッチを押すことで入力が できます。両手を計測に専念させることができるので、入力のたびに検 査機器を持ち替えたり、補助の人を付ける必要もありません。スムーズ に歯周検査を行え、チェアタイムを短縮することができます。




選択可能な 2種類の検査圧



PerioPam

検査圧 10g~15g

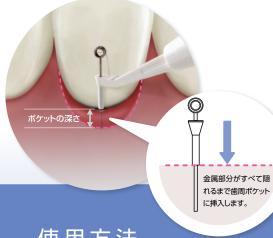

使用方法

STEP 1

適正位置まで挿入する

PerioPamの先端部分に一定以上の圧 力がかかると先端の針が引っ込むよう になっています。

適正位置まで挿入し、ポケットの中に 入っている針の長さを測ることでポケッ トの深さを計測します。



NEW LINEUP

PerioPam センシティブ

POINT 3


先端部は衛生的に優れたディスポヘッド

先端部は取り外しが可能で、衛生面も考慮されたディスポヘッドです。 また、患者さんの歯周ポケットの深さにあわせて使い分けできる**7mm**と**13mm**の2種類の長さをご用意しています。







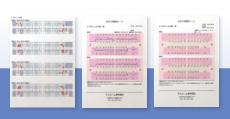

STEP 2

フットスイッチを押し確定

フットスイッチを押して、計測したポケットの数値をアプリケーションに送信します。

「出血」や「戻る」「仮入力」などを通常押しと長押しで設定することができます。

STEP 3

連携したソフトに自動入力

計測されたポケットの数値が付属ソフトの「ペリオスタジオ」に自動的に入力されます。

「達人プラス」(別売) と連携させるとさらに便利にご使用いただけます。

STEP 4

印刷して活用

入力した検査データはプリントアウト してカルテに貼付したり、患者さん説 明用資料としてご活用できます。ご説 明後はそのままお持ち帰りいただけ ます。 ペリオスタジオはインストールしたPC1台でポケット検査 が可能です。単体利用されたい医院様に最適です。



ペリオスタジオ 必要システム

対応OS	Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 *Professionalエディションを推奨いたします。 *Windows 75P1につきましては、インストール可能ですが、既に Microsoftのサポート対象外となっておりますのでご注意ください。	
ハードディスク	インストール用空きディスク1GB以上 ※登録データのための空きディスクは別途必要です。	
画面解像度	1024 × 768以上	
その他	DVD-ROMドライブ またはその互換ドライブ	

※お使いのデータが増えた場合、そのデータを格納するためのハードディスクもしくはその他のメディアが別途必要になります。 ※ご使用の環境によっては、上記システムを満たしていても正常に動作しないことがございます。
※Microsoft、Windowsは米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

▋ 別売ソフト【達人プラス】によってできること

達人プラスは院内ネットワークを作ることでデータ共有ができます


達 人 プ ラ

T A T S U J I N P L U S

※別売品

■プラーク・ポケット

学術的な視点から捉えた歯周検査を継続的に管理し、正しい情報を患者さんに お伝えすることができます。

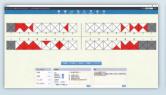



各画面にスコアが表示される

様々なデータを一括管理 良質なインフォームド・コンセントを実現

■画像管理・編集



レイアウトした画像で患者さんに説明し、 そのまま印刷してお渡しできます。

インフォームドコンセントとして使える

■□腔内情報



ビジュアル的な治療計画書を作成し良好な 治療説明ができます。

歯列が大きく表示されスムーズに操作できる

達人プラス 必要システム

対応OS	Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 *XP、Vistaでは動作しません。 *親機は、Professionalエディションが対象となります。 *Windows 7SP1につきましては、インストール可能ですが、既にMicrosoft のサポート対象外となっておりますのでご注意ください。
ハードディスク	インストール用空きディスク 1GB以上 ※登録データのための空きディスクは別途必要です。
画面解像度	1280×1024以上
その他	インターネット接続、またはUSBポート

※お使いの画像やデータが増えた場合、そのデータを格納するためのハードディスクもしくはその他のメディアが別途必 ※Dicrovedia、 ※ご使用の環境によっては、上記システムを満たしていても正常に動作しないことがございます。 ※Microsoft、Windows、Microsoft 365は、米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

達人プラス 利用料

月額利用料	8,000円	初期費用0円
1年パック	90,000円	6,000円お得 6.2% OFF
3年パック	260,000円	28,000円お得 9.7% OFF
6年パック	490,000円	86,000円お得 14.9% OFF

利用料に含まれるサービス

・契約期間における利用ライセンス ・製品の無償アップデート及びアップグレード

・フリーダイヤルによる電話サポート ・遠隔サポート

インストール媒体

弊社ホームページからダウンロードをお願いします。 インストール用DVDをご希望の場合は、別送(有信)になります。

達人プラスへのデータコンバートについて

達人プラスVersion3~5からはデータのコンバートが可能です。 ただし、達人プラスVersion2からはデータのコンバートには費用がかかります。

達人プラスは同じ医院内のPCに何台でもインストールができます。 また、ネットワークを作ることでデータを共有することができます。

※ネットワークでご使用の場合は正常なネットワーク環境が整っていることが条件となります。 ※インターネット環境の無いコンピュータでのご利用は、一部のサポートが制限されます。

安心の訪問設定サポート

訪問設定サポート(製品設定及び使用方法説明)をご希望の場合、¥100,000と交通費にて承ります。

※全ての表示価格には別途消費税がかかります。

ソフト比較

	歯周データ管理	印刷可能パターン	レセコン 頭書きリンク	歯周データ カルテ連動
ペリオスタジオ (付属)	0	1点法 / 4・6点法 / 比較1点法 比較4・6点法 / カルテ用印刷 計5種類	_	_
達人プラス (別売)	0	A4サイズ、B5サイズ、プラーク統合印刷など 計22パターン	O**	O*



歯周ポケット測定器

Perio Pam

検査圧: 20g~25g PerioPam 本体 医院価格 128,000円



歯周ポケット測定器



検査圧: 10g~15g

PerioPam センシティブ 本体

医院価格 128,000円

【本体共通仕様】PerioPam・PerioPam センシティブ

仕様	
サイズ	16mm×185.8mm
重 量	48g
定格電圧	DC 5V(USBパスパワー)
消費電流	0.1A(最大)
USBコード長	2m

精度及び測定位	±様	
測定範囲	7mm	0~6mm
冽处靶团	13mm	0~12mm
最小表示单位	!	1mm
表示精度		±0.5mm

構成品	本体 PerioPam ディスポヘッド7mm PerioPam ディスポヘッド13mm ペリオスタジオ DVD	1本 2個 2個 1枚
一般的名称 機器の分類 認証番号 製造販売業者 住所	JMDN70697000 歯周ポケット測定器 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器 228AIBZX00027000 株式会社ナルコーム 長野県佐久市遙田 1251-239	

フットスイッチ



■ PerioPam USB 1連無線フットスイッチ※1 医院価格 40,000円

入力設定※2

通常	決定
長押し	出血



■ PerioPam USB 2連無線フットスイッチ※1

医院価格 70,000円

入力設定※2

右	左	
決定	戻る	通常
出血	排膿	長押し
出血	排膿	

■ セット価格 本体(PerioPam もしくは PerioPam センシティブ) + フットスイッチ(1連無線もしくは2連無線)の組み合わせでご使用いただけます。

Perio Pam

USB 1連無線フットスイッチ 医院価格 168,000円

Perio Pam SENSITIVE

USB 1連無線フットスイッチ

医院価格 168,000円

Perio Pam

※1 電源を必要としない通信技術[enocean]を採用しています。

USB 2連無線フットスイッチ

医院価格 198,000円

Perio Pam SENSITIVE

※2 初期設定の状態です。好みに合わせて変更できます。

USB 2連無線フットスイッチ

医院価格 198,000円

別売品

PerioPam ディスポヘッド 7mm (100個入) PerioPam ディスポヘッド 13mm (100個入) PerioPam ディスポヘッド アソート (50個×2種入)

医院価格 各14,000円



オプション

ワイヤレス化したい方へ

PerioPam ワイヤレスキット

医院価格 90,000円



安心の訪問設定サポート

製品仕様

量 使用電池 連続使用時間

W69×D115×H19.5mm 100g (電池含まず) 単4乾電池×2本 約3時間半

(電池の性能に影響を受けます)

Bluetooth仕様

適合規格 Bluetooth Ver3.0 class2 通信距離

最大10m (遮蔽物があると距離は短くなります)

使用周波数带域

2.4GHz 変調方式 GFSK方式

付属品

単4形充電池付き充電器セット

ecoモード搭載


使用せずに15分放置した場合に、電池の消費を 抑えるために省エネモードに切り替わります。

※Bluetooth搭載のコンピュータが必要です。 ※PerioPamワイヤレスキットは医療機器ではございません。

※全ての表示価格には別途消費税がかかります。 ※価格は2023年4月現在のものです。 ※仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

本製品に関するお問い合わせ先

製造販売元

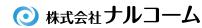

本社・工場 〒384-2107 長野県佐久市蓬田1251-239

松戸営業所 〒271-0091 千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル5階 TEL. 047-364-7656 FAX. 047-364-7657

E-mail info@narcohm.co.jp URL https://www.narcohm.co.jp

